

Careturner®

INNOVATIVE CARE TECHNOLOGY

Unik løsning til automatisk og individuel tryksårsforebyggelse, forflytninger og sansestimulering



- Individuel tilpasset tryksårsforebyggelse
- Sansestimulering forbedrer søvn, komfort og velvære
- Frigivelse af tid til mere pleje og omsorg
- Forbedret arbejdsmiljø og sikker borgerhåndtering

Hvad er Careturner?

Careturner® er et innovativt hjælpemiddel til automatisk og individuel forebyggelse af tryksår, forflytninger og sansestimulering

FUNKTIONER:



Individuel tryksårsforebyggelse

Careturner styres af en computer og laver ingen støj eller vibrationer. Det sikrer behagelig og skånsom aflastning af trykpunkter, når borgeren stillingsændres.



Sansestimulering

Careturner kan løfte begge vinger og omslutte borgeren. Det har en beroligende effekt på borgeren, optimerer komforten og forbedrer søvnen.



Hjælp til forflytninger

Careturner kan betjenes manuelt. Det gør den ideel til forflytning og håndtering i arbejdsmiljøer med kun en enkelt plejer



Følger sengens funktioner

Careturner er nem at installere. Alle sengens funktioner kan stadig bruges til optimal komfort.



Automatisk brug af Careturner®


Man kan indstille 2 programmer til optimal forebyggelse af tryksår. Tid og vinkler for hver side kan indstilles. Careturner fungerer meget lydsvagt og uden vibrationer, hvilket sikrer at borgeren kan sove uforstyrret.

- Tid fra 0-180 min. mellem hver stillingsændring
- Vinkler fra 0-40°
- Muligt at aflaste en given side, hvis det er nødvendigt (venstre, højre eller rygliggende)
- Modhold på 0-12° fra modsatte side reducerer shear og forbedrer komfort
- Timer funktion kan indstilles, så Careturner begynder automatisk på ønsket tidspunkt
- Skift fra tryksårsforebyggelse direkte til plejefunktion uden ventetid
- Pausefunktion Skifter tilbage til automatisk funktion efter 30 minutters inaktivitet i plejefunktion

Manuel brug af Careturner®


Idéal til sikker borgerhåndtering ved manuel forflytning, sejpålægning eller ved personlig pleje.

- Betjen begge vinger samtidig eller alene.
- Vingerne kan hæves fra 0-80°
- Smartknapper sikrer automatisk modhold fra den modsatte side for at undgå shear samt øge komfort
- Reducerer uønsket fysisk kontakt med sengeliggende, ideel til udadreagerende borgere
- Smartknapper bevæger begge vinger samtidig for at sikre maksimal komfort og sikkerhed når borger drejes fra en side til den modsatte

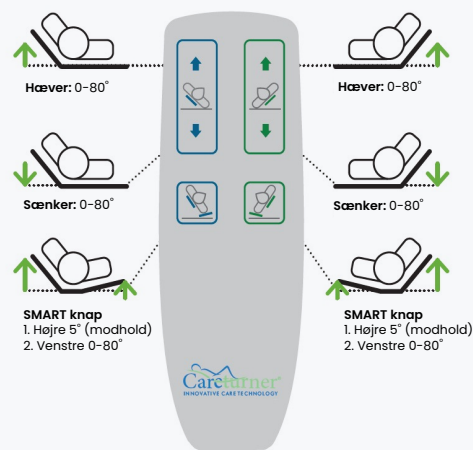

BEHANDLING AF TRYKSÅR ER 5 GANGE DYRERE END FOREBYGGELSE

Trykmåling af 30° med 9° modhold

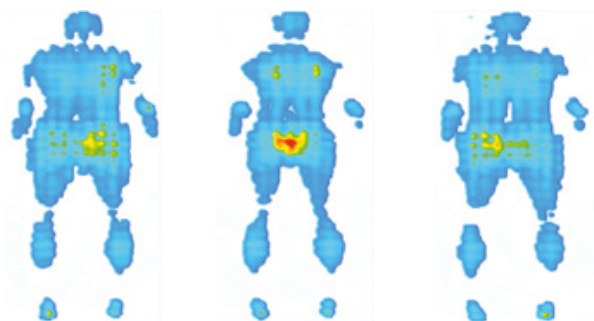


Aflastning af højre side

Careturmer er ikke aktiveret

Aflastning af venstre side


Trykmåling af "krammet"

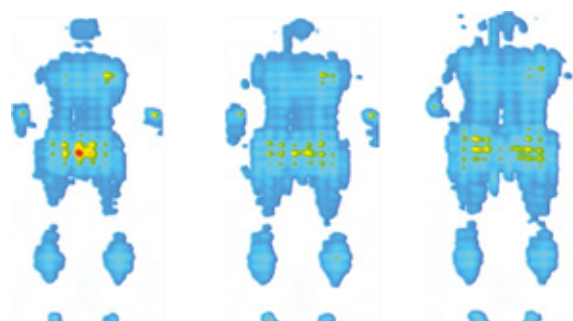

Careturmer er ikke aktiveret

15-15°

20-20°

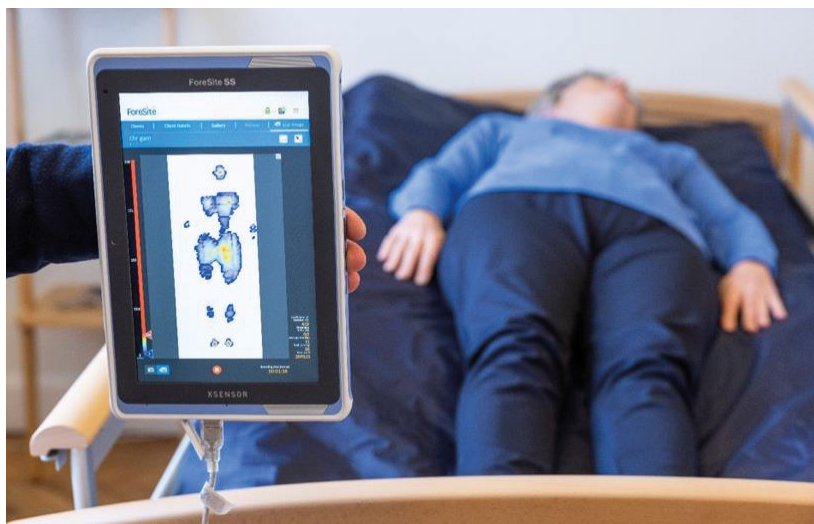

Seneste velfærdsteknologiske vurderinger konkluderer:

95% af alle borgere skal ikke længere stillingsændres efter brug af Careturner.

50% af Alle borgere føler sig generelt mere rolige og er lettere at arbejde med i forbindelse med forflytningsopgaver i sengen.

Careturmer betragtes som en velfærdsteknologi, der kan tiltrække nye og fastholde nuværende sundhedspersonale.

4 Millioner mennesker lider af tryksår i Europa*

Det anslås, at 95% af alle tryksår kan forebygges. Forebyggelse af tryksår koster per patient per dag op til 87€. Behandling af tryksår koster per patient per dag op til 470€

*Kilde: EPUAP & National Clinical Guideline til forebyggelse af tryksår

Careturmer® anvendes indenfor



- Demens
- Hjemmepleje
- Palliativ pleje
- Akut pleje
- Rehabilitering
- Geriatrik Psykiatri
- Forebyggende pleje
- Intensiv

Careturner frigiver ressourcer i sundhedssektoren

3-IN-1 LØSNING



BEDRE KOMFORT OG UFORSTYRRET SØVN

- Forebygger tryksår
- Større komfort og færre smerter
- Bedre søvn
- Færre konflikter mellem borger og plejepersonale



FORBEDRET ARBEJDSMILJØ

- Sikker borgerhåndtering
- Færre tunge løft
- Reduceret nedslidning af plejepersonale
- Færre arbejdsrelaterede sygdomme




BEDRE RESSOURCEUDNYTTELSE

- Automatiske stillingsændringer frigiver ressourcer
- Effektiv mobilisering (fra 2 til 1 plejer)
- Tidsbesparelser for organisationen (ROI: 3-4 måneder)
- Smartere processer frigør ressourcer til bedre kvalitet i plejen
- Reducerer antallet af udkørsler for hjemmeplejen

13.6 millioner
plejepersonaler
kommer til at mangle i
hele verden inden 2030

** Verdenssundhedsorganisationen*

Prognose for udviklingen af
plejebæhov på verdensplan

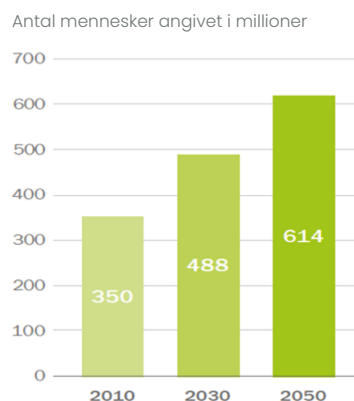

CARETURNER® KAN ANVENDES PÅ FØLGENDE PLEJESENGE:



Vinkler ved
manuel
anvendelse

0-80



Vinkler ved
automatisk
anvendelse

0-40



Tidsinterval i
automatisk
anvendelse

0-180 min



Max
brugervægt

PW 165 Kg.*
SWL 185 Kg.*



Tungeste del
af produktet

18 kg



Grader det blå
cover kan vaskes
ved

80

*Specifikationer afhænger af de enkelte modeller



**Careturner
Akademi**

Scan for videoguides,
vejledninger og
dokumentation



Careturner A/S - Silovej 16 | DK-2690 Karlslunde - Denmark +45 31105555 info@careturner.com www.careturner.com